

NÁVOD

Postup při nasazování respirátoru na obličej

Pro zajištění ochrany respirátorem je nutné jej správně nasadit a umístit na obličej, neboť při špatném nasazení a umístění se výrazně sníží úroveň ochrany.

Před nasazením respirátoru jej zkontrolujte, zda je kompletní a není mechanicky poškozený. Nepoužívejte respirátory, které jsou používány déle než 8 hod., respirátory se zvýšeným dýchacím odporem a zanesením, či s prošlou dobou expirace, která je uvedena na obalu respirátoru.

1. Respirátor přiložte k obličejí tak, aby nosní pásek (výztuha) byl v místě nosu a aby byl respirátorem zakrytý nos a brada.

2. Poté za přidržování respirátoru k obličejí jednou rukou, ukazováčkem a palcem druhé ruky přimáčkněte nosní pásek k nosu a vytvarujte jej podle linie nosu tak, aby nosní výztuha a respirátor co nejlépe kopírovaly linii nosu a obličejí a byla tak zajištěna těsnost podél linií respirátoru umístěného na obličejí.

3. Je-li to zapotřebí, dotvarujte nosní pásek a zkontrolujte kontakt a těsnost respirátoru s obličejem.

4. Proveďte kontrolu těsnosti následujícím způsobem. Oběma rukama zakryjte respirátor a velmi intenzivně se nadechněte. Pokud respirátor netěsní a vzduch proniká kolem nosu nebo jinde kolem těsnící linie, je nutné znovu upravit nasazení respirátoru posunutím do vhodnější polohy, úpravou vytvarování nosního pásku či posunutím upínacích pásků do vhodnější polohy.

Tipy pro nasazování

- Před nasazením respirátoru si vydezinfikujte ruce.
- Nasazujte respirátor tak, aby se nosní svorka nacházela nahoře v jeho středu.
- Před samotným nasazením doporučujeme vytvarovat nosní svorku tak, že ji jemně prohnete do tvaru obráceného písmene U. Pokud je potřeba, dotvarujte nosní svorku přímo na obličejí.
- Přiložte respirátor tak, aby zakrýval nos, ústa i bradu.
- Správně nasazený respirátor těsně doléhá k obličejí, proto jej nasazujte vždy na oholenou tvář.
- Po nasazení respirátoru se nedotýkejte rukama jeho přední části.

Jak správně sundat respirátor

- Respirátor sundávejte vždy za jeho zadní upínací pásky. Nedotýkejte se rukama jeho přední části.

Specifikace

Třída ochrany: FFP2 NR

Testovací norma: EN 149:2001 + A12009

Osobní ochranný prostředek kat. III. dle nařízení EU 2016/425

Životnost respirátoru

Životnost respirátoru je mimo jiné závislá na prostředí, ve kterém se s ním pohybujeme. U respirátorů FFP2 je stanovena osmihodinová životnost, což je doba, po kterou by měl respirátor účinně ochránit svého nositele. Doba použitelnosti: 2 roky. Datum výroby je uvedeno na obalu výrobku. Filtruje: bakterie, viry, prach, aerosol, smog, kouř. Velikost: univerzální pro dospělé osoby. Skladování: uchovejte v suchu

Dovozce **Winner group-WG, s.r.o.**, Žihla 997, 739 91, JABLUNKOV, Czech Republic VAT(DIČ): CZ26788357, IČO:26788357

Notifikovaná osoba CE 2163: **Universal Uygunluk Degerlendirme Hizmetleri ve Tic. A.Ş.**
Tatlısu Mah. Arif Ay Sk. No:16-3 Umraniye-Istanbul /TURKEY
Umraniye-Istanbul / Turecko

Phone : +90 216 455 80 80
Fax : +90 216 455 80 08

Email : info@universalcert.com
Website: www.universalcert.com